

Mascarilla Reutilizable /Lavable. Compuesta de 3 capas de tejido: Algodón, napa y malla. Ajuste nasal de alambre galvanizado. (moldeable y lavable). Posee elástico de ajuste para las orejas



Diseño:



Talla única, color blanco.

Se recomienda planchar a temperatura mínima de 70° luego del lavado, ya que el planchado previene aparición de:

- Chinchas, piojos y parásitos como el que produce la sarna.
- Evita la aparición de hongos.
- Disminuye la propagación de enfermedades como la gripe humana e infecciones por contacto como conjuntivitis



Indicado uso hasta 15 lavados (lavar a mano con agua a mínimo 60° utilizando detergente normal, o bien sumergirlas en una dilución de cloro 1:50 con agua tibia durante 30 minutos y enjuagar bien)



1
Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos con agua y jabón o usa una solución de alcohol.



2
Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate que no haya espacios entre tu cara y la máscara.



3
Evita tocar la mascarilla mientras la usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón o usa una solución de alcohol.



4
Quítate la mascarilla por detrás, sin tocar la parte delantera. Lávate las manos con agua y jabón.